

2 A Teschio e denti, 1489.

RI. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e'r i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.



UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche



Perchè Modo ?



- SVILUPPATO PER UTENTI IN ESITI DI LESIONE MIDOLLARE
- DISTRIBUISCE I CARICHI
- CONFORTEVOLISSIMO
- LEGGERISSIMO



KIT STRUTTURALE MODULARE
E MODIFICABILE CON CONTENIMENTO
PERIMETRALE PRESAGOMATO



KIT DI IMBOTTITURA
Forme Libere PROTETTIVA
ED AMMORTIZZANTE



COMODO E SICURO
FODERA CON TASCA

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'unità posturale bacino Inserto Spine Modo è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti con lesione midollare, in particolare:

- Che necessitano di un lieve/moderato supporto posturale;
- Che conducono una vita attiva e necessitano di un cuscino maneggevole ed agevole nei trasferimenti;
- Che sono soggetti ad un lieve/medio rischio di piaghe da decubito fornendo uno scarico trocanterico e coccigeo;
- Che presentano asimmetrie, obliquità e rotazioni pelviche, retroversioni ed anteroversioni di entità lieve;
- Che presentano una moderata carenza di massa gluteica.

L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggrappanti.

PTS Pelvic Total Support

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni Unità Posturale Inserto MODO include:

- Kit strutturale composto da una base presagomata con contenimento perimetrale e 8 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente;
- Kit di imbottitura lavabile con detergente neutro che si presenta con una diversa stratificazione:
 - Uno strato superiore di memory foam per la più elevata protezione al rischio di piaghe da decubito e uno strato inferiore nella sola zona posteriore di foam viscoelastico a ritorno lento di memoria per favorire il massimo confort ed adattamento alla sagomatura del corpo;
 - Una pad centrale di schiuma poliuretanicca espansa flessibile ed elastica con pad di schiuma polietilenica automodellante e 2 pad di schiuma polietilenica automodellante per incrementare la protezione e/o livellare gli ischii;
- Fodera di rivestimento New 3D areata, incontinente, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si consiglia utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI ■ Base presagomata di costruzione ■ Fodera di rivestimento ■ Kit di imbottitura

AVVERTENZE

L'Unità posturale Inserto Seat Modo, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio dell'Unità Posturale Inserto Seat Modo, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com





Inserto Modo

8 INSERTI MODULARI MODIFICABILI


FODERA "NEW 3D" ELASTICA, INCONTINENTE, AREATA.

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO MODO												MISURE (cm.)		
MODELLO	3638	3642	3840	3845	4040	4045	4242	4245	4250	4545	4550	4848	4850	5050
Larghezza Effettiva (cm)	36	36	38	38	40	40	42	42	42	45	45	48	48	50
Largh. Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	34	34	36	36	38	38	40	40	40	43	43	46	46	48
Lunghezza Effettiva (cm)	38	42	40	45	40	45	42	45	50	45	50	48	50	50
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	40,5	44,5	42,5	47,5	42,5	47,5	44,5	47,5	52,5	47,5	52,5	50,5	52,5	52,5
Lunghezza Min ottenibile con asportazione materiale e/o rimozione inserti (cm)*	36	40	38	43	38	43	40	43	48	43	48	46	48	48
Range Min e Max altezza anteriore base presagomata di costruzione+inserti allogg gambe 1/2/3 (cm)**	4,5/5,5		** altezze riferite ai modelli 3638 e 5050											
Range Min e Max altezza posteriore base presagomata costruz (cm)**	8/9		** altezze riferite ai modelli 3638 e 5050											
Peso unità posturale (min/max): 1kg/2,5kg														

* possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale


° Portata Max. (riferita al modello 5050): 135 Kg

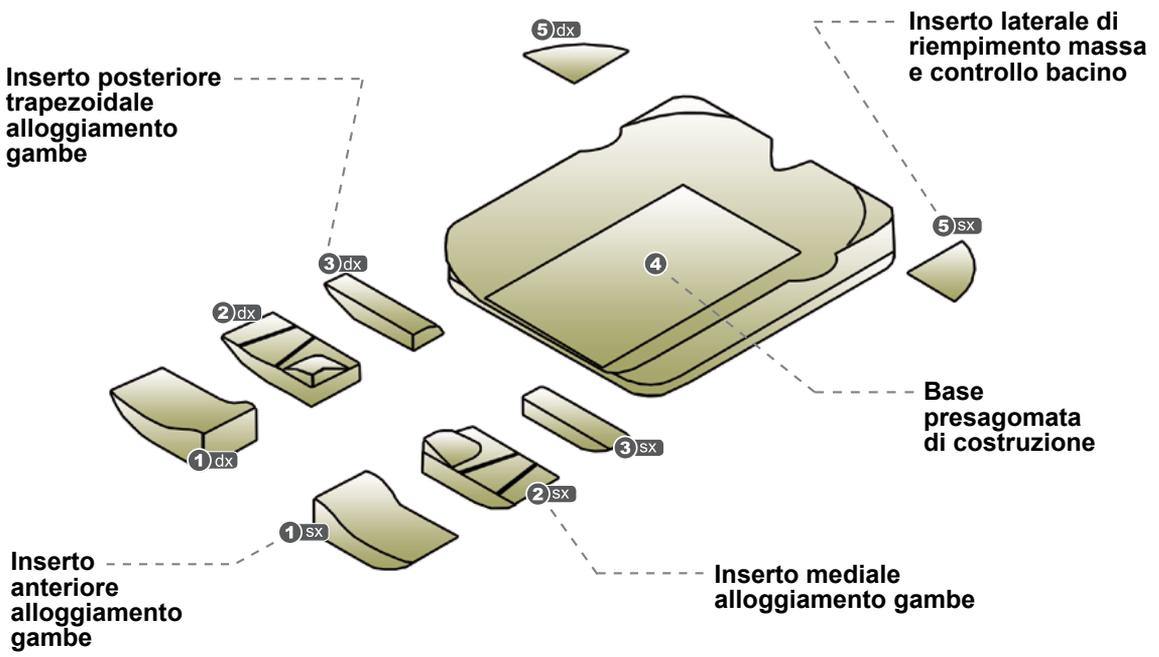


O D O




Personalizzazioni Modo

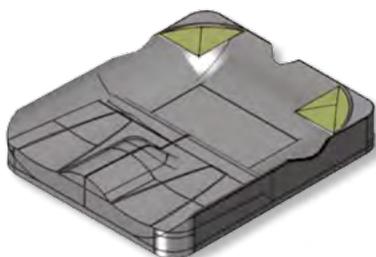


RIEMPIMENTO MASSA GLUTEICA E
PERSONALIZZAZIONE CARICHI

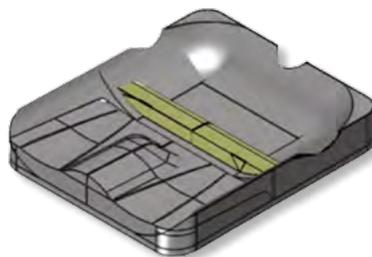


REGOLAZIONE BLOCCO PRE-ISCHIATICO

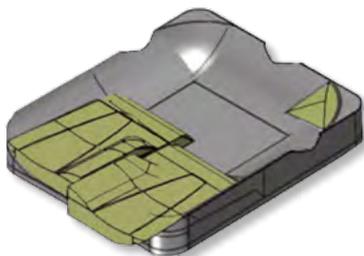

ASIMMETRIA DOVUTA A ROTAZIONE

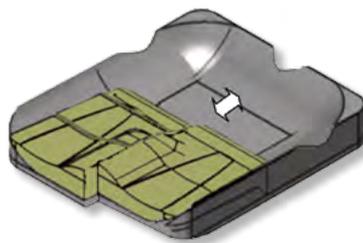

PERSONALIZZAZIONE PROFONDITÀ

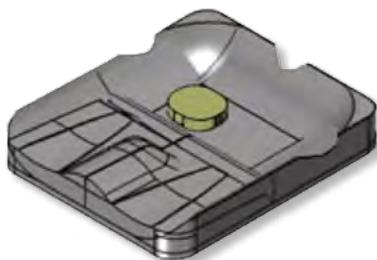

GESTIONE OBLIQUITÀ PELVICA
(SCARICO ISCHIO)

PERSONALIZZABILE
INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione
della seduta individuale



LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti.

www.versainserito.com

1 PREVIENE L'IPERCARICO PRESSORIO

Maggiore è il materiale che supporta il carico corporeo, minore è lo stress dei tessuti profondi e del cuscino che sostiene il carico

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. Supporta l'orientamento sacrale e garantisce il contenimento del sistema di relazione gambe/bacino/rachide.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.





PRODOTTO DA:





Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

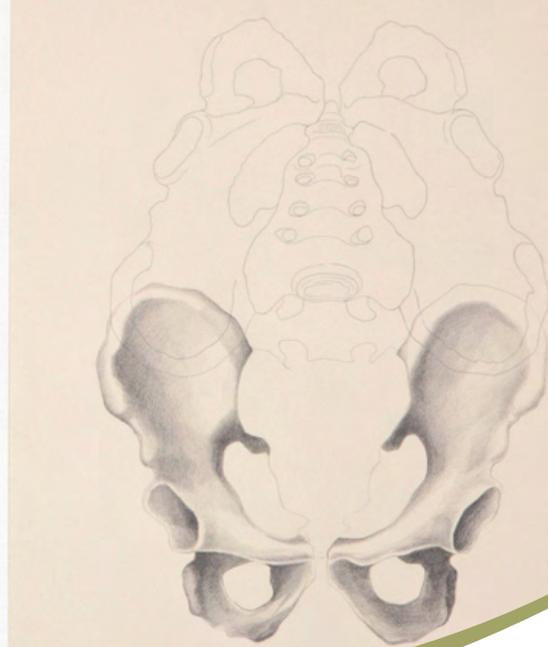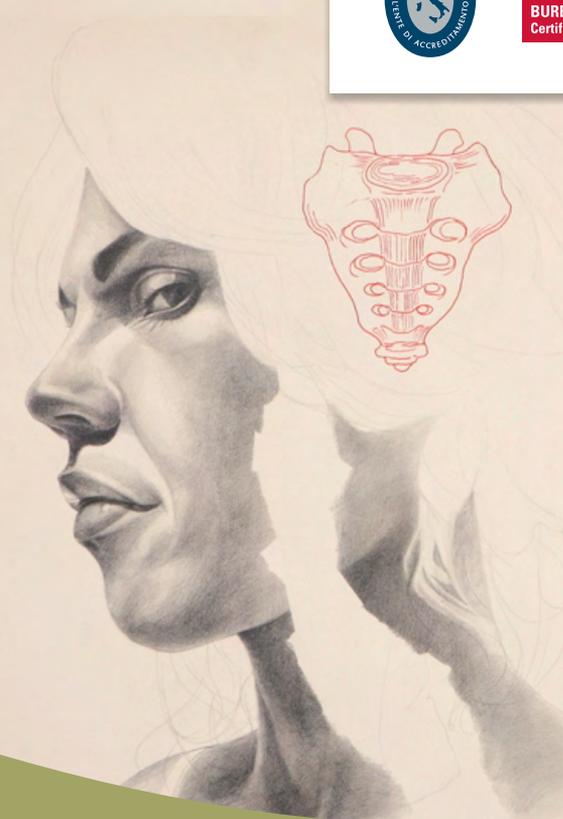

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com