

Thinking **NOVO**
inserto[®]
SPINE

SPINE


SEAT

UNA NUOVA SOLUZIONE
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

2 A Teschio e denti, 1489.

RI. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

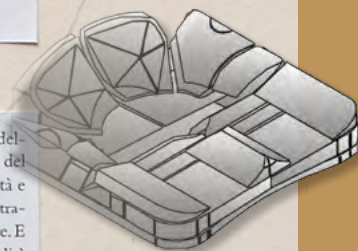

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche



Perchè Novo ?

- SVILUPPATO PER UTENTI IN ESITI DI LESIONE MIDOLLARE
- DISTRIBUISCE I CARICHI
- ALLINEA E STABILIZZA IL BACINO
- SOSPENSIONE E SCARICO ISCHIO TROCANTERICO
COCCIGEO - SACRALE - PERINEALE
- FAVORISCE L'ALLINEAMENTO DEL TRONCO E LE SUE FUNZIONI



**KIT STRUTTURALE MODULARE
E MODIFICABILE A DENSITÀ
DIFFERENZIATA**



**KIT DI IMBOTTITURA
Forme Libere PROTETTIVA
ED AMMORTIZZANTE**



PERFETTA ADERENZA

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'unità posturale bacino Inserto Spine Novo è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti non deambulanti con lesioni midollari:

- Che necessitano di un alto supporto posturale;
 - Che presentano asimmetrie e deformità fisse o mobili;
 - Che necessitano di molto supporto e contenimento laterale, anteriore, posteriore e mediale del bacino;
 - Che necessitano di un blocco allo scivolamento degli ischi o sospensione trocanterica, coccigea, sacrale e perineale;
 - Che sono soggetti ad un medio/alto rischio di sviluppare piaghe da decubito;
 - Che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità e rotazioni pelviche, retroversioni ed anteroversioni pelviche di grave e gravissima entità;
 - Che presentano atrofia muscolare e tissutale, carenza di massa, tessuti informi, cute sensibile;
 - Che hanno subito interventi chirurgici anche ricostruttivi;
- L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggiranti.

PTS Pelvic Total Support

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni Unità Posturale Inserto NOVO include:

- Kit strutturale a densità differenziata composto da una base piatta di costruzione e 24 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente;
- Kit di imbottitura, lavabile con detergente neutro, che si presenta con una diversa stratificazione:
 - Uno strato superiore di memory foam per la più elevata protezione al rischio di piaghe da decubito e uno strato inferiore nella sola zona posteriore di foam viscoelastico a ritorno lento di memoria per favorire il massimo confort ed adattamento alla sagomatura del corpo;
 - Un pad centrale di schiuma poliuretanicca espansa flessibile ed elastica con pad di schiuma polietilenica automodellante;
- Fodera di rivestimento, New 3D areata, incontenente, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si consiglia utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Fodera di rivestimento
- Kit di imbottitura

AVVERTENZE

L'Unità posturale Inserto Seat Novo, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio della Unità Posturale Inserto Seat Novo, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com





Inserto Novo

24 INSERTI MODULARI MODIFICABILI

FODERA "NEW 3D" ELASTICA, INCONTINENTE, AREATA.

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO NOVO

MISURE (cm.)

MODELLO	3638	3642	3840	3845	4040	4045	4242	4245	4250	4545	4550	4848	4850	5050
Larghezza Effettiva (cm)	36	36	38	38	40	40	42	42	42	45	45	48	48	50
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	38	38	40	40	42	42	44	44	44	47	47	50	50	52
Largh. Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	34	34	36	36	38	38	40	40	40	43	43	46	46	48
Lunghezza Effettiva (cm)	38	42	40	45	40	45	42	45	50	45	50	48	50	50
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	40,5	44,5	42,5	47,5	42,5	47,5	44,5	47,5	52,5	47,5	52,5	50,5	52,5	52,5
Lunghezza Min ottenibile con regolaz. tagli posteriori e rimozione inserti (cm)*	32	36	34	39	34	39	36	39	44	39	44	42	44	44


Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz+inserti allogg gambe 1/2/3 (cm)** 4,5/5,5 ** altezze riferite ai modelli 3638 e 5050

Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz+inserti contenit bacino 7 (cm)** 9,5/11,5 ** altezze riferite ai modelli 3638 e 5050


Peso unità posturale (min/max): 1.5kg/2.4kg

* possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale


° Portata Max. (riferita al modello 5050): 135 Kg

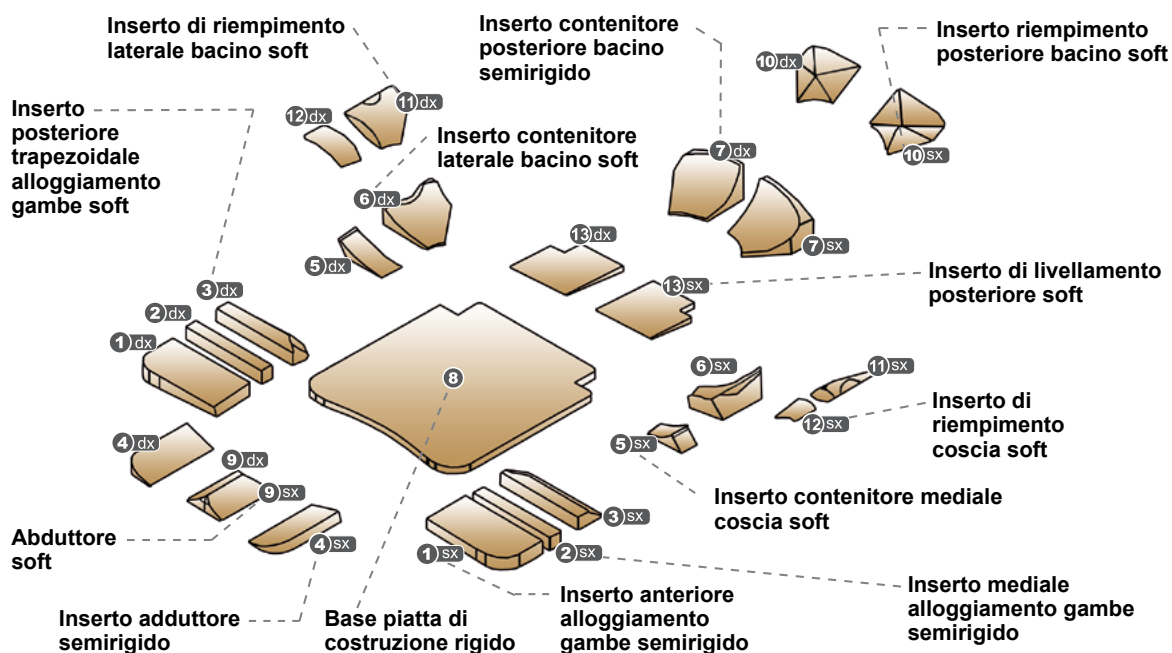


Personalizzazioni Novo

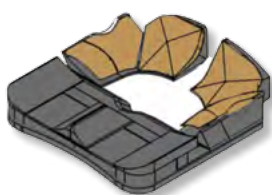

RIEMPIMENTO MASSA
STRUTTURA BACINO

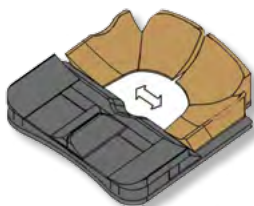


REGOLAZIONE APPOGGI TROCANTERICI
PER PREVENZIONE IPERCARICO ISCHII

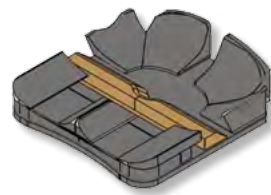


GESTIONE
ANTISCIVOLAMENTO BACINO




GESTIONE ADDUZIONE

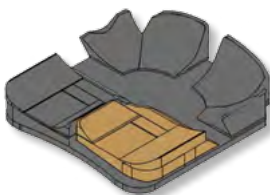

GESTIONE ASIMMETRIA 1

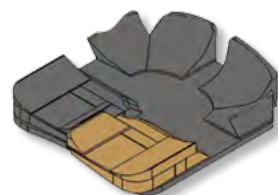

GESTIONE ASIMMETRIA 2

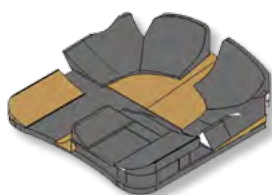


GESTIONE FISSITÀ FEMORE



GESTIONE ROTAZIONE BACINO



GESTIONE ASIMMETRIA DOVUTA A
ROTAZIONE BACINO

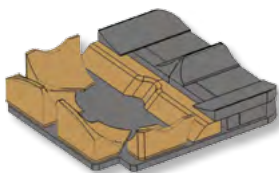

GESTIONE RETROVERSIONE
BACINO E ANTIVERSIONE

PERSONALIZZABILE
INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione
della seduta individuale



LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggiranti. L'unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facilmente trasportabile.

www.versainserito.com

1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.





PRODOTTO DA:





Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

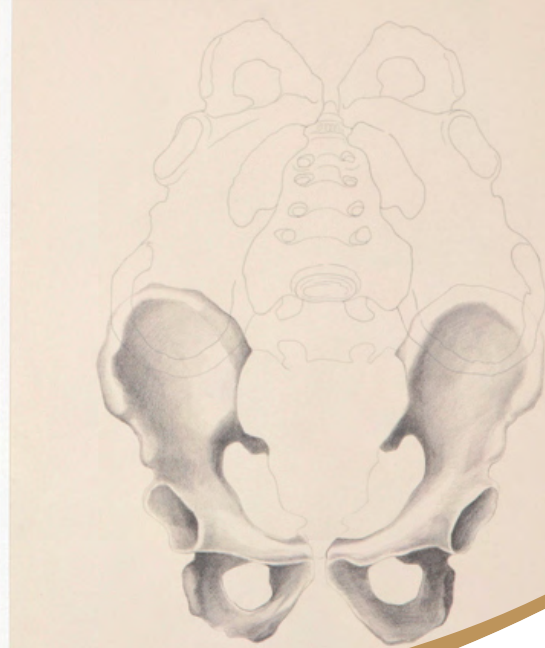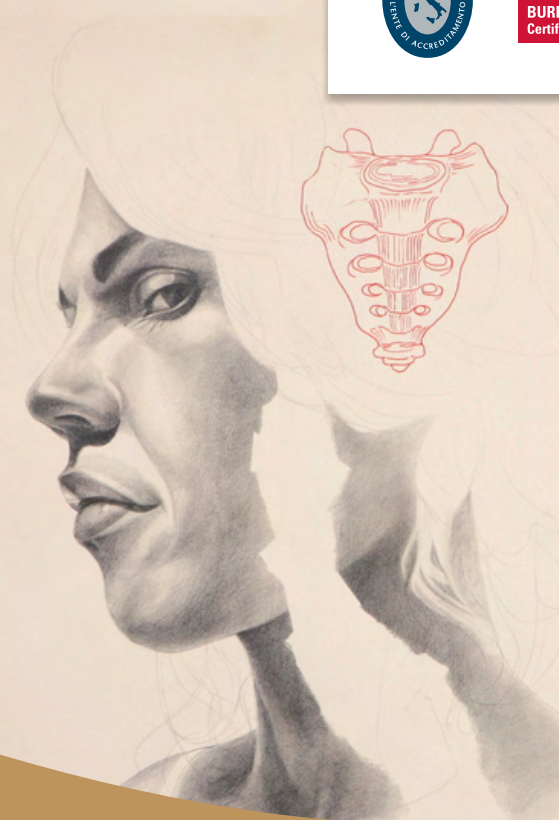

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com